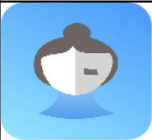
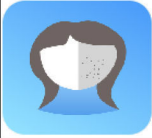
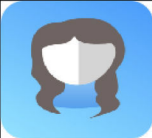


Tabela zalecanych parametrów ND YAG

Problem zmiany (skórnej)	Obrazek	Klasyfikacja zmian (skórnych)	Zalecana głowica zabiegowa	Obrazek	Zalecana optymalna odległość	Początkowa energia	Częstotliwość	Przerwa między zabiegami	Liczba zabiegów	Odpowiedź kliniczna na zabieg	Uwagi
1. Znamię		-	①532 ②755		5-7 cm (+ -)	400MJ(+ -)	1HZ(+ -)	28 dni	1-3	① Po zabiegu zalecane jest zastosowanie naprawczego białego kremu. ② Po zabiegu może pojawić się wysypka podskórna.	Aby zapobiec ciemnieniu skóry, należy zwrócić uwagę na wzmocnienie ochrony przeciwsłonecznej.
2. Przebarwienia		① Przebarwienia naskórkowe ② Zmiany skórne ③ Przebarwienia mieszane	①532 ②1064 ③532/1064		5 cm (+ -)	400MJ (+ -)	1 HZ (+)	① 28 dni ② 60 dni ③ 90 dni	① 1-2 ② 1-3 ③ 3 lub więcej	① Po zabiegu zalecane jest zastosowanie naprawczego białego kremu. ② Po zabiegu może pojawić się delikatne krwawienie.	Typowe zmiany: 1. Piegry, plamy słoneczne, rogowacenie łojotokowe 2. Znamię Ota, jarzmowe brzoza -niebieskie znamie 3. Melasma (stabilna faza)
3. Ciemne plamy na twarzy		-	1320		7 cm (+ -)	200MJ (+ -)	6 HZ (+ -)	28 dni	3-6	Po szybkim wchłonięciu się preparatu skóra może być jaśniejsza i bardziej delikatna	Nałóż cienką warstwę toniku, głównie w celu pokrycia skóry. Zabieg kliniczny wykonuje się po całkowitym wyschnięciu. Twarz 1/2. Oczyszcz głowicę zabiegową po zabiegu.
4. Tatuaze		① Jasne kolory ② Ciemne i czarne kolory	①532 ②1064		5-7cm (+ -)	200MJ(+ -)	1HZ(+ -)	① 45 dni ② 90 dni	① 3 lub więcej ② 1-3	① Po zabiegu zalecane jest zastosowanie naprawczego białego kremu. ② Po zabiegu może pojawić się delikatne krwawienie.	Reprezentatywne kolory: 1. Czerwony, żółty, pomarańczowy 2. Ciemnoniebieski, ciemnoszary, czarny
5. Usuwanie makijażu permanentnego		Brwi, eyeliner, usta	①532 (czerwony) ②1064 (niebieski, czarny)		5cm (+ -)	200MJ (+ -)	1 HZ (+ -)	60 dni	① 3-6 ② 1-3	Miejsce zabiegu natychmiast zmieniło pomyślnie kolor lub pojawiły się drobne punkty krwawienia	-
6. Zaawansowany tryb zabiegu		Według preferencji klienta	Wybierz odpowiednią pod preferencje klienta		Wybierz odpowiednią	Wybierz odpowiednią	Wybierz odpowiednią	Wybierz odpowiednią	Wybierz odpowiednią	Proszę potęczyć wybraną głowicę zabiegową. Odpowiedź kliniczną obserwuj na bieżąco	Osoba przeprowadzająca zabieg powinna mieć wiedzę na temat każdej głowicy zabiegowej oraz umieć rozpoznać i osiągnąć kliniczny punkt końcowy, aby skutecznie rozwiązywać różnorodne problemy związane z uszkodzeniami skóry.

Uwaga: Rzeczywiste parametry zabiegu klinicznego powinny być dostosowywane w górę lub w dół w zależności od reakcji skóry pacjenta. Jeśli nie ma odpowiedzi klinicznej, energię można zwiększyć o 50 mJ za każdym razem.