

Wytyczne dotyczące czyszczenia i konserwacji

Rękojeść do fali uderzeniowej pneumatycznej (pocisk i prowadnica/lufa)

Prowadnica do fali uderzeniowej pneumatycznej



Pocisk do fali uderzeniowej pneumatycznej



1. Codzienne czyszczenie po użyciu

Pocisk: Wyjmij pocisk z prowadnicy po każdym zabiegu. Przetrzyj go delikatnie miękką, niepozostawiającą włókien ściereczką oraz alkoholem medycznym (70%). Unikaj stosowania środków żrących lub zanurzania w płynach.

Prowadnica: Wprowadź do środka matłą szczoteczkę czyszczącą lub wacik bawełniany lekko zwilżony alkoholem. Usuń wszelkie pozostałości proszku, kurzu lub osadów z wnętrza prowadnicy. Przed ponownym złożeniem urządzenia pozostaw do całkowitego wyschnięcia na powietrzu.

2. Cotygodniowa / Okresowa konserwacja

Nałóż cienką warstwę lubrykantu medycznego na bazie silikonu na powierzchnię pocisku przed ponownym umieszczeniem go w prowadnicy. Zmniejsza to tarcie i zapobiega przedwczesnemu zużyciu.

Sprawdź, czy wewnętrzna ścianka prowadnicy jest gładka i wolna od zarysowań. W przypadku poważnych uszkodzeń należy wymienić element. Regularnie kontroluj gumowe uszczelki i pierścienie typu O-ring; wymień je, jeśli stwardnieją lub ulegną uszkodzeniu.

3. Ważne uwagi i środki ostrożności

Nie używaj wody ani silnych środków dezynfekujących, które mogą powodować korozję elementów metalowych lub gumowych. Upewnij się, że pocisk i prowadnica są całkowicie suche przed rozpoczęciem pracy, aby zapobiec rdzewieniu i awarii.

Nie używaj rękojeści bez włożonego pocisku, ponieważ może to uszkodzić system powietrzny. Przechowuj pocisk i akcesoria w czystym, suchym miejscu, gdy nie są używane. Przestrzegaj zalecanego harmonogramu serwisowego (zwykle co 1–2 miliony uderzeń, w zależności od modelu) w zakresie wymiany pocisku i prowadnicy.